



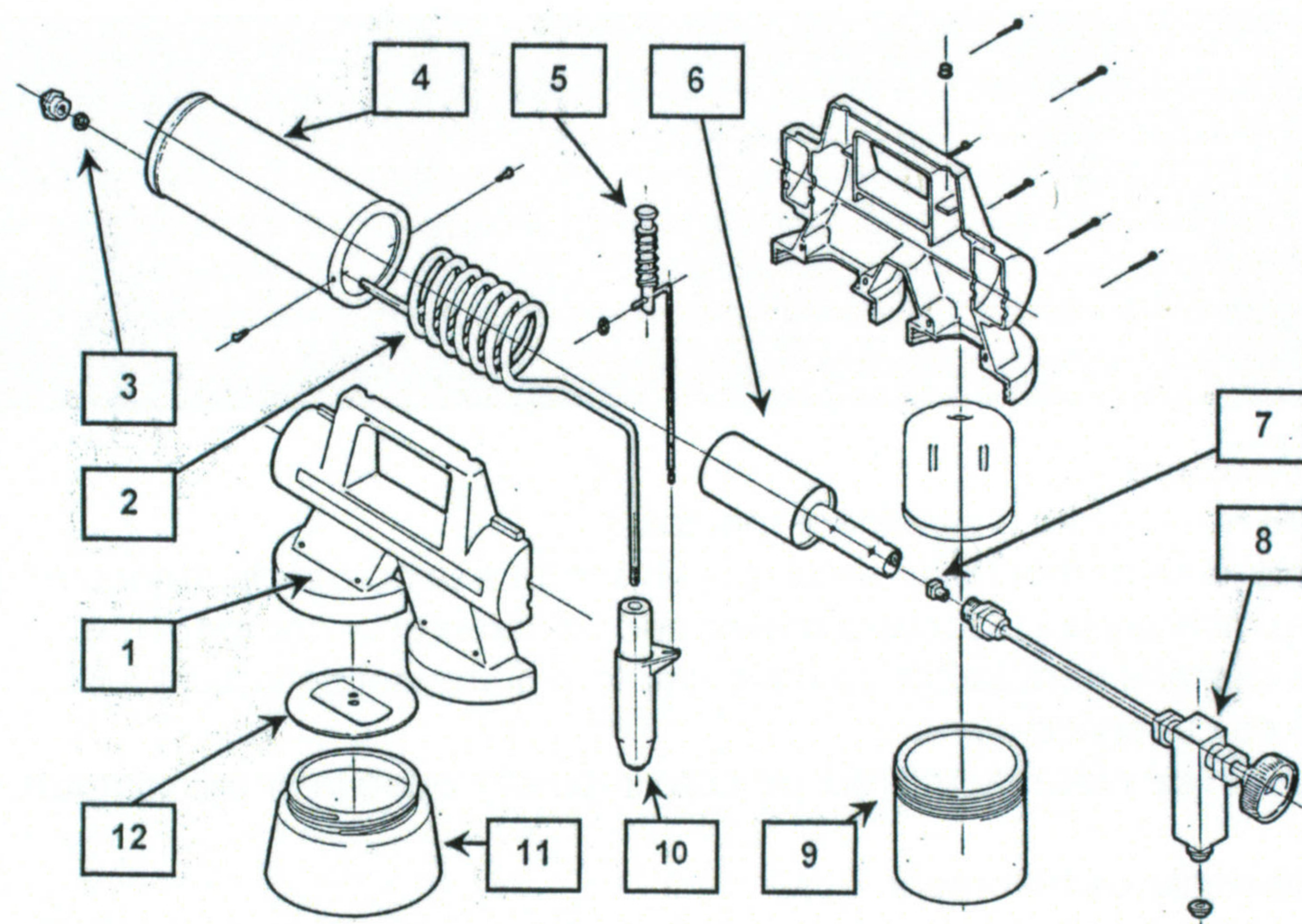

1 Impugnatura completa di viti	1 Plastic body	1 Manche complet de vis.	1 Ergreifen mit schrauben
2 Serpentina	2 Serpentine	2 Serpentin	2 Serpentine
3 Spruzzatore	3 Sprayer (nozzle)	3 Vaporisateur	3 Strahlduese
4 Protezione completa di viti	4 Round shield	4 Protection complete de vis	4 Schutz mit schrauben
5 Pulsante con asta e molla	5 Push button	5 Bouton avec tige et ressort	5 Knopf mit stange und feder
6 Fornello	6 Burner	6 Fourneau	6 Brenner
7 Getto	7 Jet	7 Jet	7 Duse
8 Valvola gas completa	8 Gas governor	8 Vanne du gas	8 Gasventil
9 Contenitore per cartuccia gas	9 Red container for gas cartridge	9 Recipient pour cartouche de gaz	9 Gaseinsatz behälter
10 Pompa completa	10 Pump	10 Pompe	10 Vollpumpe
11 Vaschetta liquido	11 Tank for the product	11 Cuvette liquide	11 Produktbehälter
12 Guarnizione vaschetta	12 Seal	12 Joint cuvette	12 Wannchendichtung

Manual de Utilizare

Furetto

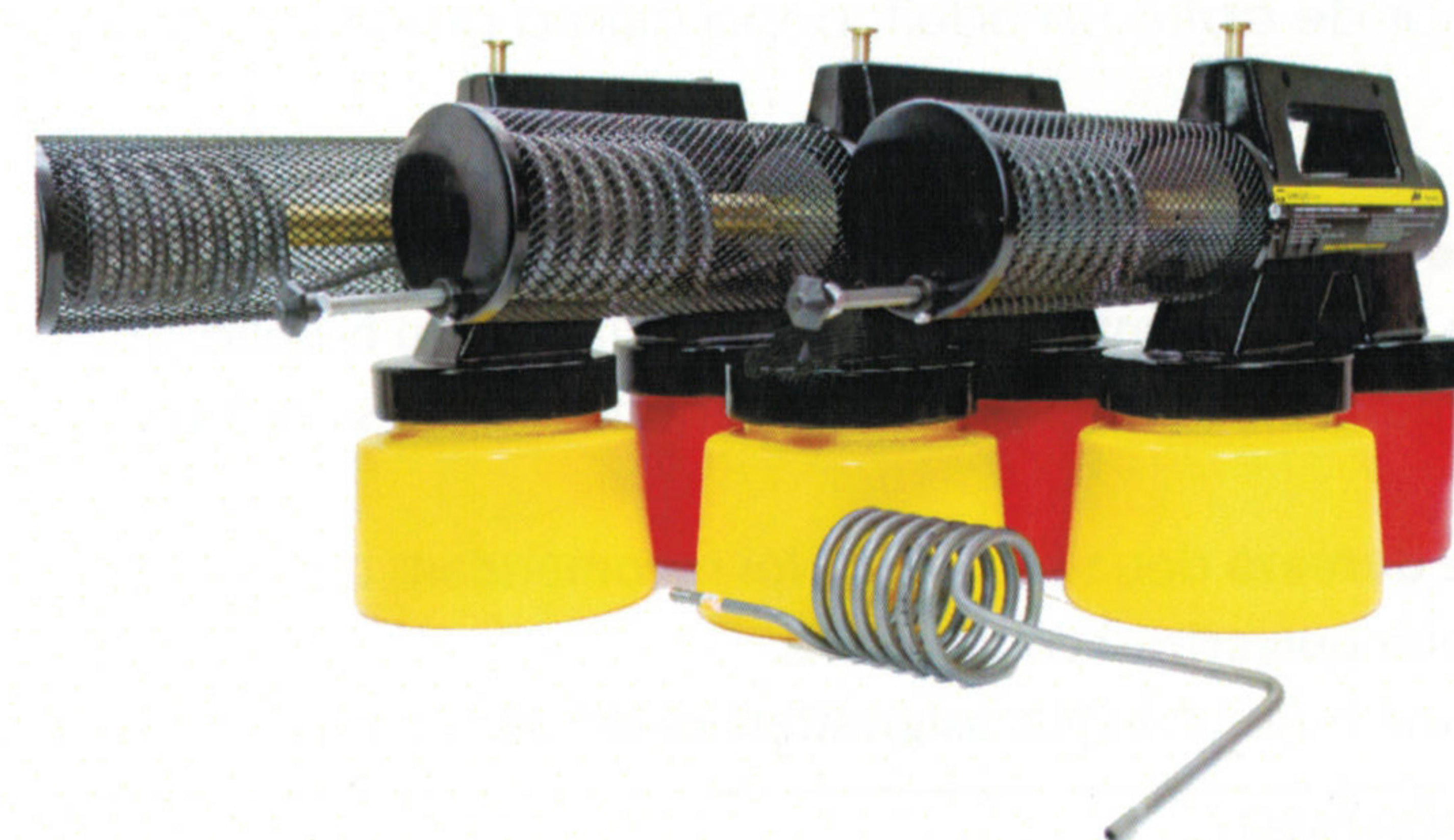

Numar de înregistrare:

1. Reguli generale de siguranta

Dispozitivul functioneaza cu gaz si poate cauza accidente grave in urmatoarele conditii:

- utilizare incorecta
- inlaturarea protectiilor si a accesoriilor de siguranta
- interventii de service neautorizate

Producatorul nu se face responsabil de accidentele cauzate de nerespectarea informatiilor din acest manual.

1.1 Prezentarea dispozitivului

Aparatul de tratament Furetto este utilizat pentru tratarea varozei la albine.

NU SE UTILIZEAZA CU ACID OXALIC

1.2 Lucratorul cu Furetto

Aparatul nu implica risc de utilizare, chiar daca personalul care il utilizeaza nu are pregatire specializata.

Se utilizeaza doar de catre un adult, dupa citirea prealabila a prezentului manual.

2. Instructiuni de utilizare:

Aparatul contine magazia pentru solutie si magazia pentru butelie. Solutia de tratament va fi impinsa de pompa catre serpentina incinsa si va fi transformata in fum si pulverizata.

Aceasta operatie dureaza doua secunde. Noi recomandam o pauza de 5 secunde intre doua pulverizari consecutive.

Inainte de a schima butelia de gaz asigurativa ca ati oprit complet robinetul de gaz.

IMPORTANT:

**Inlocuiti butelia de gaz doar cand aceasta este complet goala, si in absenta surselor de flacara si caldura.
Butelia utilizata va fi cea de butan gas 190 gr.**

Introduceti substanta de tratament in vasul de culoare galbena, si infiletati recipientul la Furetto.

Asezati Furetto pe o suprafata plana, aprindeti un chibrit si apropiati-l de partea superioara a arzatorului, apoi deschideti robinetul de gaz.

Lasati arzatorul sa se incalzeasca pentru cateva minute, apoi incepeti tratamentul.

ATENTIE:

In timpul functionarii, protectia de metal a arzatorului este incinsa si poate cauza arsuri.

Daca pe serpentina se pulverizeaza lichid, inseamna ca serpentina nu a ajuns la temperatura necesara, si este nevoie de mai mult timp intre pulverizari.

IMPORTANT:

- Dupa terminarea tratamentului, opriti gazul.
- Demontati si goliti recipientul pentru solutia de tratament.
- Introduceti in recipient gaz lampant simplu, fara substanta de tratament.
- Aprindeti aparatul si pulverizati in gol, pentru a goli serpentina si pompa de resturile de amitraz, care se pot solidifica si infunda aparatul.
- Pentru a fi complet curatat, aparatul trebuie intors in toate pozitiile in timpul pulverizarii de curatare.

2.1 Intretinere

Furetto nu necesita o intretinere speciala.

Ocazional se demonteaza stutul de pulverizare si se curata de reziduurile arse.

Nu se utilizeaza apa, aceasta provocand oxidarea unor componente.

Nu se intervine neautorizat. La orice simptom al vreunei defectiuni, luati legatura cu service-ul.

Disponem de piese de schimb, pe care le puteti vedea in anexa alaturata.

2.2 Substante de tratament

Nu se utilizeaza ulei de parafina, sau alte substante de aprins carbunii.

Furetto utilizeaza ca substanta de amestec doar petrol demineralizat, respectiv gaz lampant.

Medicamentele utilizate sunt cele uzuale pentru varoza:

Taktic – 8-10 ml la 100 ml gaz

Mitak 6 ml la 100 ml gaz

Varachet 6 ml la 100 ml gaz

Producatorul recomanda:

- tratati doar stupii fara puiet pentru rezultate optime, sau repetati tratamentul de 3 ori la interval de 7 zile
- tratati doar cand temperatura exterioara depaseste +8 C
- apasati butonul pompei doar o singura data la un stup
- preparati substanta de tratament doar cand o utilizati
- tratati doar stupii fara magazii.